

MICRO CLEAN

CE IVD In vitro dijagnostički medicinski proizvod

Razvrstavanje prema Uredbi (EU) 2017/746 - proizvod **Klase A**

Otopina u bočici s raspršivačem za brzo i učinkovito uklanjanje parafina s radnih površina i instrumenata

UPUTA ZA RUKOVANJE

OSNOVNI UDI broj	385889212HPC30704EMBEP7	
EMDN kód	W01030704	
REF Kataloški broj	Volumen	UDI-DI broj
MC-OT-100	100 mL	03858890009019



Namjena proizvoda i načelo testiranja

Tijekom rutinskog rada u histopatološkom laboratoriju svakodnevna je pojava nakupljanje suvišnog parafina na radnim stolovima i instrumentima, osobito kod uklapača tkiva u parafin gdje se radi s tekućim parafinom te na mikrotomu gdje se režu parafinski blokovi. Važno je održavati laboratorij čistim i redovito uklanjati nakupljene ostatke parafina. Često se u tu svrhu koriste otapala poput ksilena ili toluena koji su poznati po iznimno štetnom utjecaju na zdravlje, dok je BioGnostov Micro Clean jednako učinkovita alternativa koja nije štetna za ljude i okoliš. Micro Clean otopina nalazi se u bočici s raspršivačem omogućavajući precizno i jednostavno korištenje.

Opis proizvoda

- **MICRO CLEAN** – Otopina u bočici s raspršivačem za brzo i učinkovito uklanjanje parafina s radnih površina i instrumenata

Postupak korištenja:

1.	Micro Clean otopinu našpricati na nečistu radnu površinu i/ili instrumente na kojima se nalaze ostaci parafina	
2.	Ostaviti Micro Clean da djeluje određeno vrijeme	1 do 30 minuta
	Napomena: vrijeme djelovanja ovisi o količini parafina na radnoj površini – ukoliko ga ima malo, dovoljno je svega nekoliko minuta, a ako ga ima puno, preporuča se ostaviti 30 minuta	
3.	Pomoću papirnatoг ručnika, vate ili staničevine obrisati otopljeni parafin	

Ograničenja

Ovaj proizvod namijenjen je samo za profesionalnu laboratorijsku upotrebu u dijagnostičke svrhe.

Ukoliko tijekom upotrebe proizvoda ili kao posljedica njegove upotrebe, dođe do ozbiljnog incidenta, molimo prijavite ga proizvođaču i/ili ovlaštenom predstavniku i nadležnom tijelu.

Zaštita na radu i zaštita okoliša

Ukoliko tijekom upotrebe ovog proizvoda ili kao posljedica njegove upotrebe, dođe do ozbiljnog incidenta, molimo prijavite ga proizvođaču i/ili ovlaštenom predstavniku i nadležnom tijelu. Proizvodom rukovati u skladu sa smjernicama zaštite na radu i zaštite okoliša. Korištene otopine i otopine kojima je istekao rok trajanja moraju biti zbrinute kao poseban otpad u skladu s nacionalnim smjernicama. Reagensi korišteni u ovom postupku mogu predstavljati opasnost za ljudsko zdravlje. Ispitivani uzorci tkiva potencijalno su infektivni te je nužno poduzeti potrebne mjere zaštite ljudskog zdravlja u skladu sa smjernicama dobre laboratorijske prakse. Obavezno pročitati i postupati u skladu sa znakovima obavijesti i upozorenja otisnutima na etiketi proizvoda, uputi za rukovanje te u sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na zahtjev.

Skladištenje, stabilnost i rok valjanosti

Po primitku, proizvod skladištiti i čuvati na suhom, u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži na temperaturi od +15 °C do +25 °C. Ne zamrzavati i ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti. Nakon prvog otvaranja, proizvod se može upotrebljavati do navedenog roka trajanja, ukoliko je pravilno skladišten. Datum proizvodnje i rok valjanosti otisnuti su na etiketi proizvoda.

Literatura

- Carson, F. L., Hladik, C. (2009): Histotechnology: A Self-Instructional Text, 3rd ed., Chicago: ASCP Press.
- Kiernan, J.A. (2008): Histological and histochemical methods: Theory and Practice, 4th ed., Bloxham, Scion Publishing Ltd.

Upozorenja i mjere opreza u vezi s materijalima sadržanima u proizvodu:		
	H226	Zapaljiva tekućina i para.
	H304	Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
	H318	Uzrokuje teške ozljede oka.
	EUH066	Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
	P210	Čuvati odvojeno od toplote, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
	P280	Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
	P301+P331+P310	AKO SE PROGUTA: o NE izazivati povraćanje i odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
	P305+P351+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

MC-IFU_HRV3, 25.02.2026. IŠP

Proizvođač	LOT Broj serije	Pročitati priloženu uputu	Europska sukladnost
Datum proizvodnje	REF Kataloški broj	Oprez	Jedinstvena identifikacija proizvoda
Rok uporabe	°C Temperaturno ograničenje	Samo za in vitro dijagnostičku primjenu	

BioGnost d.o.o.
Međugorska 59, 10040 Zagreb, Hrvatska, www.biognost.com

Verzija	Opis / razlog izmjene	Datum
3	Revidirano u skladu s Uredbom (EU) 2017/746 - IVDR	25.02.2026.